

DSレジン

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリレート系ポリマーまたはモノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には絶対に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

- 1) 粉：メタクリル酸エステルの重合体の細粉
- 2) 液：メタクリル酸エステルの単量体

【使用目的、効能又は効果】

義歯床用合成樹脂。

【操作方法又は使用方法】

- 1) レジンの粉液比は、粉11gに対して液4g(約4.2cc)です。
※粉は少なくとも、多くてもよい義歯は得られません。
- 2) 液を専用のレジン混和袋に入れ、粉を少しずつ加えていきます。次に袋の中の空気を抜いてチャックを閉め、粉と液が馴染むよう約10秒～15秒間手で揉んだ後、スパチュラ等でレジンを袋の底に集めてください。
- * 3) 混和後、DSレスタSで餅状化を行ってください。(餅状維持時間は、約20分間です)
※詳細な操作方法につきましては、DSシステムに付属のDSガイドブックをご参照ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・使用前には必ず、DSシステムに付属のDSガイドブックを一読すること。
 - ・本材を扱う際には、皮膚などに付着することを防ぐため、保護めがねと保護手袋を必ず着用すること。
 - ・開封後は、できるだけすみやかに使用すること。
 - ・DSレジン以外のレジン粉や液との混用は絶対にしないこと。
 - ・一度取り出した粉・液は、元の容器に戻さないこと。
 - ・DSレジン液は、必ず内蓋をしたうえで保管すること。
- * 粉・液の保管、管理、および餅状レジンの作製には、DSレスタSを使用すること。
 - ・一度注入した餅状レジンには、必ず廃棄すること。
 - ・粉は1kg袋をよく振り、中身を均一にしてから補充すること。なお、補充する前に360gボトルは、必ず中身を空にすること。
 - ・液は必ず使い切るようにし、絶対補充しないこと。
- * 粉・液はDSレスタS内で10時間以上温度管理を行った後、使用すること。
 - ・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
 - ・本材を使用する際には、適切な換気(1時間あたり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
 - ・本材に対して過敏症(発疹や皮膚炎)などの既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした際は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

- ・液又は液と粉の混合物は、直接素手で触らないこと。また、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - ・本材の未開封品は、冷暗所に保管すること。
 - ・使用及び保管場所は、消火装置を備え、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。
- 2) 有効期間・使用の期限
本材は、包装に記載の使用期限[※]までに使用すること。
〔記載の使用期限は自己認証(当社データ)による〕
※(例“EXP. 2011.05”は、“使用期限2011年5月”を示す)

【色調】

** <プレタイプ>
No. PP1 プレピンク 1 (繊維入り)

<レギュラータイプ>
No. 1 クリア
No. 3 ピンク
No. 7 リアルピンク (繊維入り)
No. 8 ディープピンク (繊維入り)

<ハイグレードタイプ>
No. 5H コーラルピンク (繊維入り)

<スイートタイプ>
No. 3S ピーチピンク
No. 5S チェリーピンク (繊維入り)

** <シアータタイプ>
No. AB アクアブルー
No. FP フェアリーピンク

** <トゥースタイプ>
No. A1
No. A2
No. A3

【包装】

- ** 1) 粉
 - ・360g (ポリ容器内装)/化粧箱入
 - ・1kg (ラミ袋)※レギュラータイプ、ハイグレードタイプのみ
 - ・10kg (1缶)※プレタイプのみ
- ** 2) 液
 - ・350cc(瓶内装)/化粧箱入
 - ・17kg (1缶)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：三木化学工業株式会社
住所：京都府京都市中京区西ノ京西中合町18

発売元：オーディック株式会社
住所：〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-14-20
大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)

DSガイドブックを必ずご参照ください。