

ODIC

『不思議な使用感』

をお試しく下さい。

金属床に最適！

- 不思議その1 中速回転で軽く当てるだけで傷が消える。
- 不思議その2 放熱性に優れていて連続研磨が可能。
- 不思議その3 均一でなめらかな研磨面に仕上がる。

不思議な使用感のポイントは回転数

回転数を中速以下の7000rpm~12000rpmで
ご使用いただくのが秘訣です!!
通常では、遅いと思われる回転数ですが、
不思議と傷が効率よく消えます。
また、回転数が遅い分だけ研磨時の発熱量が少なく、
連続研磨も可能です。
『不思議な使用感』を感じていただける最適な回転数を
ぜひ、見つけ出してください。



7000rpm~12000rpm
の中から最適な回転数を
見つけ出してください。

クレバーホイール

貴金属・コバルト系中研磨用ホイール

お手軽な50枚入 ¥3,100
お得な300枚入 ¥16,500

※表記の金額は標準価格(税別)です。

なんと“1枚55円”

(300枚入の場合)



■使用方法：適速に古いマンドレルに取付けた後、歯科用電動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機等に装着して回転17,000rpm以下でご使用ください。■使用上の注意：使用前にハンドピースメーカーの指示に従いマンドレルの軸を確実に奥まで挿入してチェックがしっかり噛んでいることを必ず確認すること。使用前に予備回転を行い熱が無いことを確認すること。本品を使用する際は目の保護を数回のために保護用眼鏡等の防護を要すること。局所排塵装置、公的機関が認可した防護マスク等を使用し粉塵を吸入しないこと。本品は添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。本品は歯科医療従事者以外には使用しないこと。■重要な基本的事項：損傷、変形のあるものは、絶対に使用しないこと。17,000rpm以下の使用回転数を厳守すること。無垢な角度、過度の加圧状態で使用しないこと。回転中は、身体や衣服にふれないよう注意すること。■用途：貴金属・コバルトクローム系の中研磨用■外形：直径φ25mm 厚さ3mm■歯科用ゴム製研削材(一般医療機器)■製造番号27330004800014 ■添付文書が必要な方はご請求ください。

お取扱店

オーディック株式会社

〒553-0003

大阪市福島区福島7-14-20

TEL: 06-6451-7385 FAX: 06-6451-7365

受付時間: am9:00~pm5:00(土・日・祝日は休業)

URL: <http://www.odic-go.com/>