


ODIC

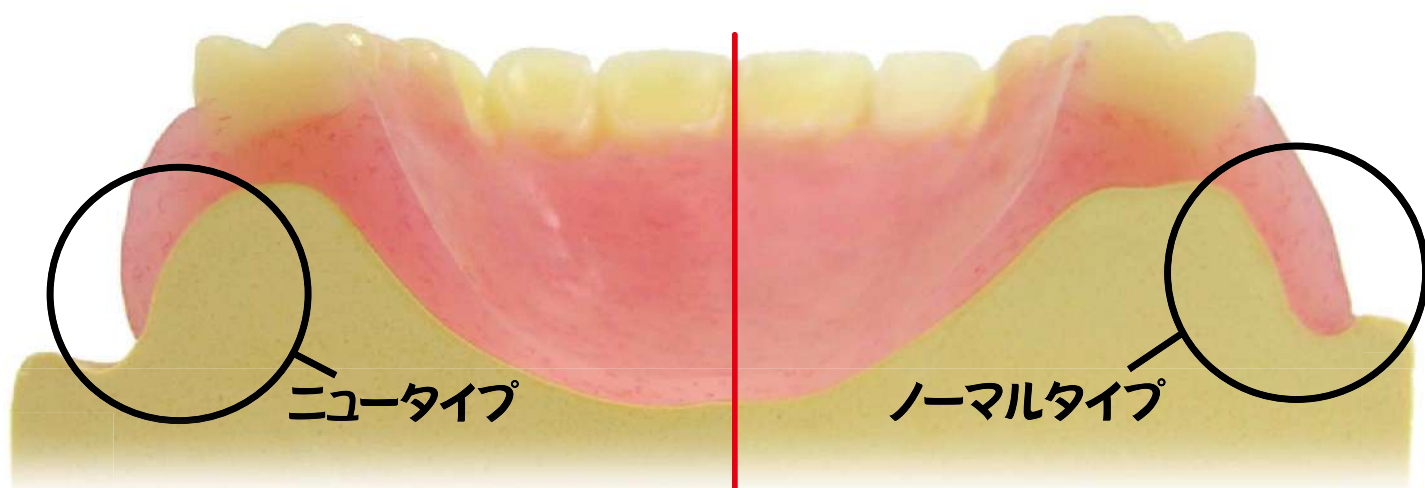

この適合をご覧ください。
オーディックデンチャー[※]と命名しました。


歴代最高の適合性！
歴代最速の製造性！



DSシステム **Sクラス**
レジン床重合システム

※DSシステム **Sクラス**で製作された義歯の愛称です。

DSシステム機種別社内データ

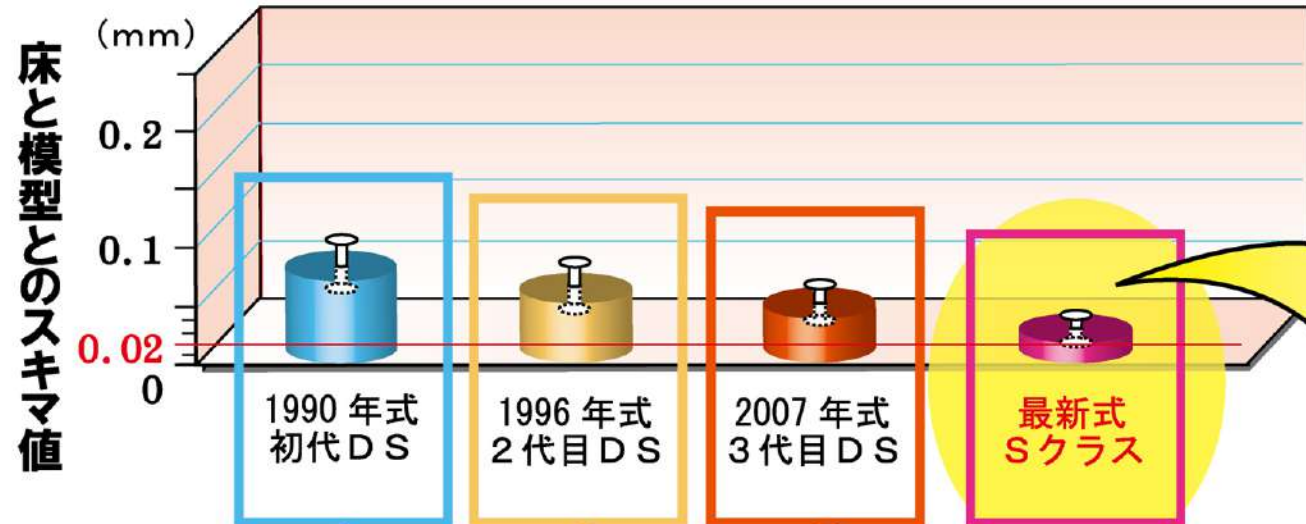

1990年
(東西ドイツの統一の年)
初代DSシステム

複数の有接点リレーによるシーケンス制御タイプで、日米製法特許を取得した超精密重合“DSシステム”の誕生。
レジジン注入器は油圧式の手動タイプ。



1996年
(アトランタオリンピック開催の年)
2代目DSシステム

DSシステム2号機として、レジジン注入機はエア可動式に。熱処理は液晶画面を採用!!



2007年
(郵政民営化の年)
3代目DSシステムXシリーズ

DSシステム初の重合コース選択機能搭載。レジジン注入圧も3ステップで昇圧させる方式を導入。

DSデンチャー

特許技術

DSシステムは、各方面でその優秀な適合性が認められており、日米で製法特許を取得しております。

日本特許証明書



アメリカ特許証




優秀な器械の証

そして オーディックデンチャー※

※Sクラスで製作された義歯の総称

温度データの管理制御をフィードバック方式化。
歴代DSシステムの中で最高の【適合性】&【生産性】を両立した4号機の誕生!!
製作義歯の総称もDSデンチャーから新たにオーディックデンチャーと改名し、海外展開を行っている最優秀機です。

NEW

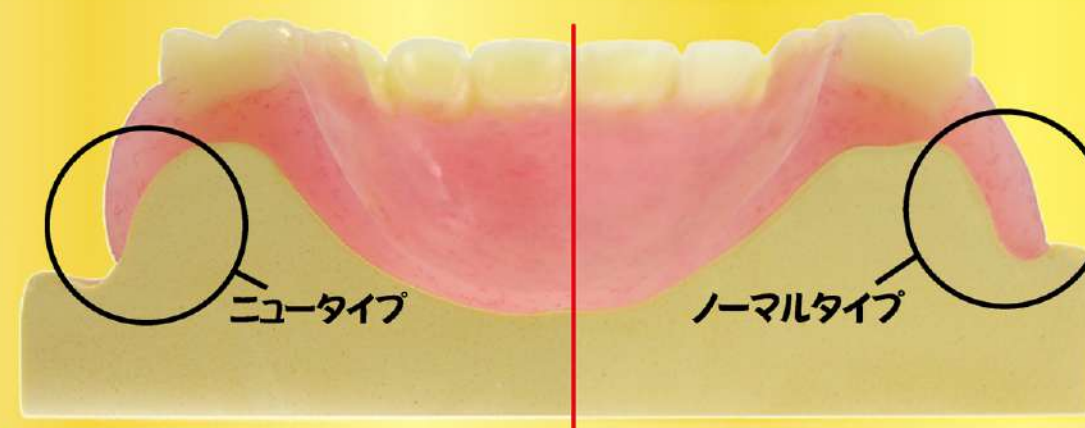

ニュータイプデンチャーという新たな義歯設計も可能です!

オーディックデンチャーとは?

DSシステムの最高峰【Sクラス】で製作した高精度義歯を総称して【オーディックデンチャー】と命名しました。

【オーディックデンチャー】には従来設計の【ノーマルタイプ】と、ボーダーを従来のような齦頬移行部に接触を求めるまで伸ばさず、辺縁をクラウンマージンの概念に近い形態にすることで、噛める・落ちないだけでなく違和感を軽減することもプラスした【ニュータイプ】の2種類があります。

ニュータイプという名の新概念

重合変形による不適合性を原点として進化した伝統ある従来法をイエロータイガーとすれば模型石膏にピッタリと適合する!!を原点としたオーディックデンチャーはホワイトタイガーにたとえてお考えください。

虎は虎でも従来と異なる虎。すなわち「義歯は義歯でも従来法と異なる義歯」それがオーディックデンチャーのニュータイプです。



従来法

イエロータイガー

接触による違和感が生じやすい

黒い部分がスキマです。




適合性があまい総義歯は、辺縁封鎖法に頼らざるを得ないので、可動性粘膜に接触を求め陰圧による吸い付き力で義歯の安定を求める。



オーディック
デンチャー

ホワイトタイガー

ノーマルタイプ

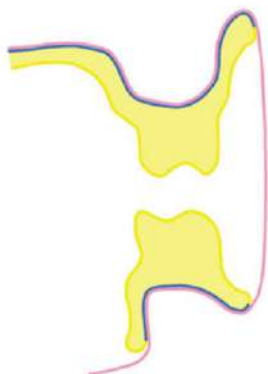


唾液による表面張力で義歯が安定するため、辺縁封鎖法などにみられる可動性粘膜への接触の必要性が減る。



ニュータイプ

違和感が減少

青い部分が唾液による表面張力発生部です。

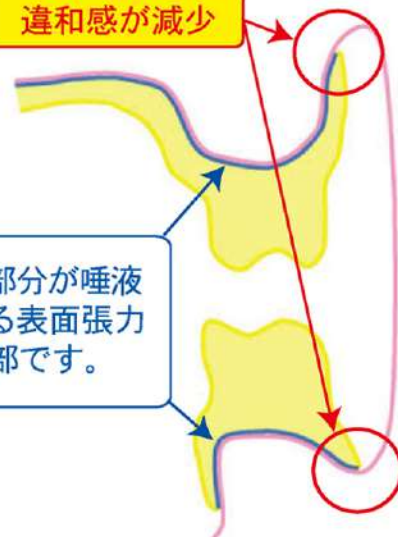

不動性粘膜との表面張力を主な力として安定を求めた設計。床下粘膜の大半は不動性粘膜である。印象が楽になり、また義歯装着時の違和感も減少する。




前庭部も解放感があり、異物感が減少する

ニュータイプの印象とセット時のポイント

印象について

- ・不動性粘膜をキッチリと印象採得してください。
- ・可動性粘膜の巻き込みや筋による隆起を減少させるため俗に言う印象時の「アイロンがけ」がポイントとなります。
- ・可動性粘膜という不定形に近い部位のほとんどを床下粘膜から除外した設計ですので、患者さんの機能運動に対しても有効です。

床下粘膜の大半は
不動性粘膜です!!

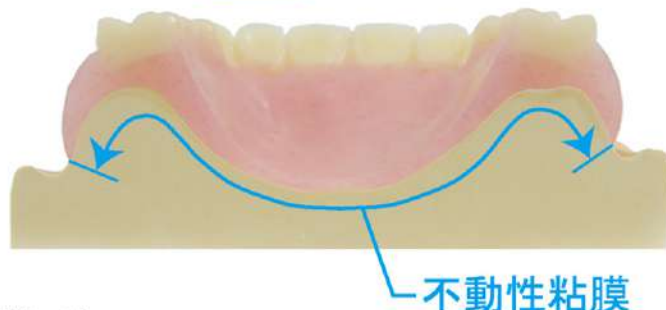

新義歯セット時の注意点

ニュータイプデンチャーは不動性粘膜との表面張力を活用した義歯です。

辺縁封鎖義歯をセットするときによく見られる術者による粘膜への押しつけは行わないでください。

粘膜と義歯の間にスキマがほぼない状態ですので、術者がグイッと押しつけても表面張力を得るための唾液が回りにまなければ安定しません。

新義歯のセット直前に患者さんに水を含んでいただき、口腔内を湿潤状態にしたのち、新義歯をソフトにセットしてください。その時点で極端な痛みを訴えられないなら、2分間ほど患者さんに義歯をゆだねて、唾液が回りこみ表面張力が得られるのをお待ちください。

材質もこだわりました!

従来の床用レジン粉末には下図のような重合促進剤、残留モノマー、不必要な水などの不純物やアレルギー物質が含まれていると報告されています。

このような不純物やアレルギー物質を独自の精製方法で極限まで取り除くことに成功したのがDSLレジンです。

オーディックデンチャーは、このDSLレジンで製作しているのも素材的にもオンリーワンのデンチャーと言えます。

不純物や
アレルギー物質を
極限まで除去した
ピュアな樹脂で
できています。



床用レジンのイメージ図



印象が楽になりました！

border moldingが楽です。

オーディックデンチャーの
ニュータイプ良いですね！
患者さんに大好評です。

調整時間が短くなりました！

- ・粘膜面の適合が良好です。
- ・咬合調整も時間短縮できました。



中川歯科医院
院長 中川 賢一 先生

Sクラスユーザー様限定「3つのお手伝い」

お手伝い1

Sクラスで製作された
「オーディックデンチャー^{※1}」の
院内掲示用ポスター^{※2}（A3サイズ）
を支給させていただきます。



お手伝い2

Sクラスで製作された
「オーディックデンチャー^{※1}」の
患者様用リーフレット^{※3}を支給させて
いただきます。




お手伝い3

Sクラス 導入医療機関の先様
リストを当社ホームページにて公開
いたします。



応援

※1：DSシステムSクラスで製作された義歯の愛称です。
※2：無償提供は10枚までとさせていただきます。
※3：無償提供は50部までとさせていただきます。
※2と※3：Sクラスご購入ユーザー様限定の支給品です。

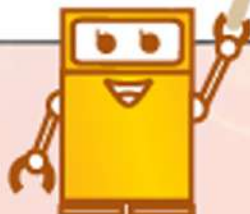

機械の特徴

DSカルマS

自動均一加熱機



フィードバック方式による温度データの管理


石膏の温度管理などをフィードバック方式にすることで、重合開始面の温度分布のバラつきが減少!! 重合完了後のフラスコの急冷を可能にした。

選べる重合コース

DSシステム最高峰のSシリーズ!


より優れた適合性を求める場合は「品質コース」。より短時間で仕上げたい場合は「最速コース」。症例に応じた重合コースをお選びいただけます。

早く仕上げないと!!
20~30分で
完成するなんて
本当に早い!

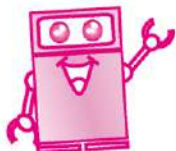

重合コース選択画面

45分以上
時間がかかるけど、
品質求めるなら
こっちなんだよね~!

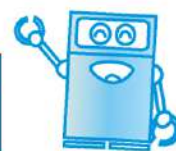

最速コース
15~35分

熱処理時間
(目安)

品質コース
45分以上

液晶画面がエスコート...

DSシステムの新キャラクター「カルマン」が、タッチパネル上で操作手順や現状報告、ユーザー様のウッカリミスや消耗品の交換、はたまた機械の故障までカラー液晶で分かりやすく案内します。

■操作手順



e.t.c...

■現状報告



e.t.c...

■ウッカリミスの表示



e.t.c...

■交換や故障の表示



e.t.c...

操作スイッチは液晶画面に表示されるタッチスイッチ方式

各操作に必要なスイッチは、必要ときに、液晶画面に表示。また、表示されるスイッチは、いつも1つだけ。だから誤操作の防止にもなり、信頼性と使いやすさを両立しました。

定期点検制度の導入

各パーツの定格寿命から定期点検時期(1500時間毎)を算出。点検時期の目安として、使用時間が液晶画面に表示されます。

現在の
使用時間

1234時間

メーカー点検時期: 約1500時間
(稼働後) 2回目以降1000時間毎(稼働後)



DSシステム 新キャラクター
「カルマン」

DSセリオS

自動レジン注入機




使いやすい多機能な操作パネル

通常使うスイッチは「レジン圧縮ボタン」と「レジン注入ボタン」の2つだけ。また「OK/NGランプ」がレジン圧縮台やフラスコのセット状態の良否を判定する安心設計です。




フラスコに注入する前に、餅状レジンの気泡を排出

空気を多量に含んだ餅状レジンを入力すると、完成義歯に気泡が発生したり部分的未重合などのトラブルを引き起こします。
DSセリオSは、餅状レジンを入力する前に約1.5トンの高圧で圧縮し、餅状レジンに混入した気泡を強力に排出します。

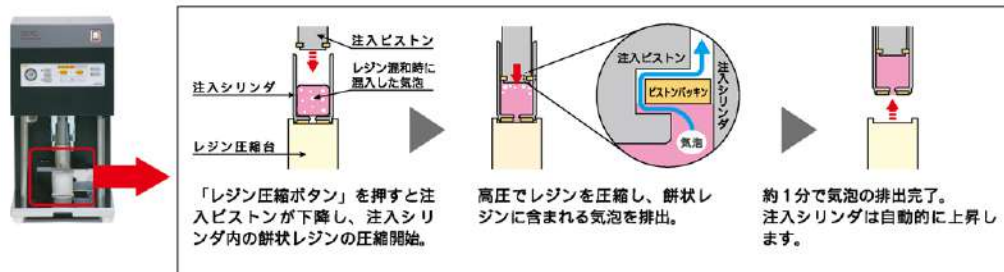


ちょっと楽しいレジン圧縮台のバネ仕掛け機構。

餅状レジンの気泡排出後、ロックレバーを軽く押し上げるとレジン圧縮台が自動的に戻るちょっと楽しい親切設計。

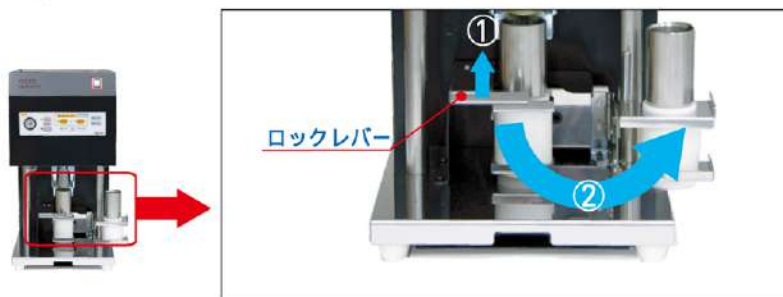

3ステップ加圧！注入レジンの硬化に合わせて注入圧が自動的に上昇！

フラスコ内に注入された餅状レジン、重合が進むにつれて流動性が低下します。それに対応して注入圧が自動的に上昇し、重合収縮分をパワフルに補填します。

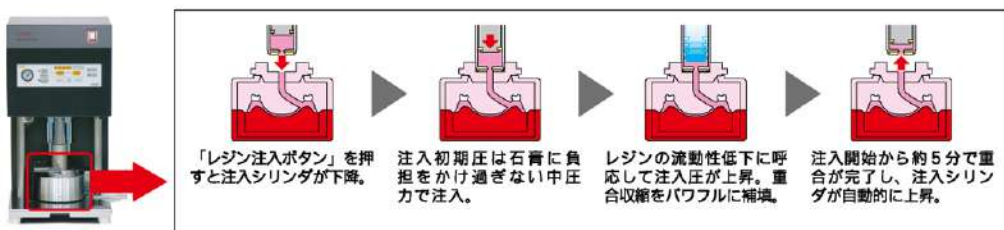

機械の特徴

DSレスタ S

自動レジン温度管理器



■ 冷暖自動切換え。オールシーズン、レジンの餅状化を管理

レジンの餅状態を手で判断するのは容易ではありません。手の感触では同じに思えても、季節による寒暖差や朝夕の気温変化による室温の高低差により、レジンの餅状態は異なります。

また、餅状態になる前のレジン柔らかく感じて流動性が悪く、注入不完全になる恐れがあります。

DSレスタ S は冷暖自動切換えで、レジンの餅状化をオールシーズン一定に管理します。

■ 餅状化のための温度、レジン粉・液のための保管温度をコントロール

レジン餅状化するための最適温度、レジンの粉を保管する最適温度、レジンの液を保管する最適温度、この3つの温度をそれぞれオールシーズンコントロールするように設計されています。

そしてDSレスタ S は「DSレジン粉 360g ボトル×3本」「DSレジン液 350cc 瓶×3本」の収容能力を持つレジン保管スペースと「レジンの餅状化ポケット×4ヶ」と「レジン混和袋保管ポケット」の4スペースで構成されています。またスロイトスタンドも付いた親切設計です。



■ レジンの餅状化完了までの残り時間が一目で分かるカウントダウン機構

混和したレジンをDSレスタ S に入れ、スタートボタンを押せば、餅状完成までの時間がカウントダウン表示されます。

餅状化完了までの残り時間



カウントダウン進行中ランプ

スタートボタン

DSレジン餅状化開始ボタン

■ レジンの餅状化完了後の経過時間が一目で分かるカウントアップ機構

餅状レジンの完成を電子音がお知らせ。同時にカウントアップ進行中ランプが点灯し、餅状化完了後の経過時間を表示。チェックボタンを押せば電子音が止まります。

餅状化完了後の経過時間



カウントアップ進行中ランプ

チェックボタン

お知らせ音を止めるボタン

リセットボタン

レジン注入作業終了後のリセットボタン

製作手順と時間

スタート

2床用

1床用

× 2 ケ

または

× 2 ケ


のフラスコを同時に
セット可能！

DSワックスブルー DSガードストーンL



■一次埋没後ワックスブルーを植立■
「DSガードストーンL」で一次埋没を行う。
「DSワックスブルー」を植立する。

ホールDストーン

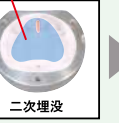


■二次・三次埋没■
「ホールDストーン」で二次埋没を行う。
「DSガードストーンL」で三次埋没を行う。

DSガードストーンL



■流ろうとレジン分離剤の塗布■
流ろう後、レジン分離剤「DSレジンセパ」を塗布する。

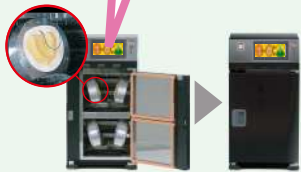

■熱処理開始■

DSカルマSにフラスコを
セットし、扉を閉める。




■重合コースの選択■

時間優先の最速コースが品質重視の品質コースのいずれかを選択し、熱処理開始。



■DSレジンの混和■

DSカルマSからレジン混和開始の合図がありしだいDSレスタSで「DSレジン」の餅状化を開始。

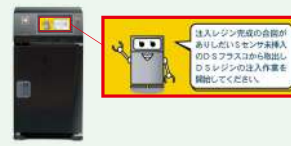


■熱処理完了■

熱処理完了の合図があればあとはDSレスタSからのレジンの餅状化完了合図を待つ。



■DSレジンの餅状化完了■

レジンの餅状化開始から21分で電子音が鳴り、餅状化完了。餅状レジンを取り出し、注入作業を開始する。

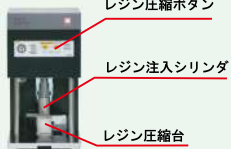


レジン圧縮ボタン

レジン注入シリンダ

レジン圧縮台

■レジン内部の気泡排出■

「レジン注入シリンダ」に餅状レジンを入れDSセリオSにセットする。
レジン圧縮ボタンを押し、約1分でレジン内部の気泡を排出。

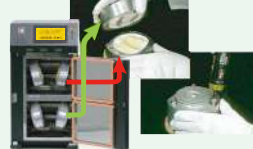

■フラスコの取出しと開輪■

軍手を着用し、DSカルマSからフラスコを一組取出す。
フラスコを開輪し、DSセリオSにセットする。



レジン注入ボタン

DSフラスコIL

■レジン注入と重合収縮補填■

レジン注入ボタンを押し、注入＆重合開始。
3ステップ圧力で自動的に重合収縮の補填を行い5分で重合終了。

Sクラスオリジナル※1「スピード冷却」

じっくり冷却

× 2

または

× 2

■室温で10分放冷■

DSフラスコを耐熱性の台にのせ、10分放冷する。

× 2

または

× 2

■水中冷却後、掘り出す■

水中に浸漬させ冷却後、義歯の掘り出しを行う。

または

× 2

または

× 2

■室温まで徐冷後、掘り出す■

DSフラスコを耐熱性の台にのせ、室温まで放冷後、義歯の掘り出しを行う。

※1：フィードバック方式化による温度データの管理制御により短時間で重合が完全に終了するので急冷が可能になりました。

※2
最短で**30分!!**後に急冷開始OK!!


従来品では
初代DS：約**3時間**
2代目DS：約**2時間50分**
3代目DS：約**2時間40分**
かかります。

※2：DSカルマSにフラスコをセットしてから義歯を掘り出すためにフラスコの急冷を開始するまでの時間で、重合は最速コースを選択した場合です。

・掲載のワックスアップ模型・人工歯・ラバーボール・筆は、撮影用の小道具であり、DSシステムSのセット内容には含まれておりません。

・液晶画面の写真はハメコミ合成したものです。

量産プラン

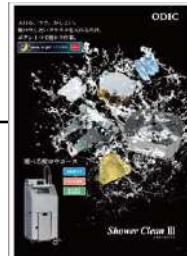

詳しくは
【シャワークリーンⅢ】の
パンフレットをご覧ください！



DS フラスコⅡ L 12ヶ

目安量
(フルデンチャーで24床分
※パーシャルデンチャーの場合、36～48床分)

シャワークリーンⅢで脱ロウ

通常コース (標準装備)



時間をセットし、自動脱ロウ

ナイト脱ロウ

※オプション



深夜に自動で脱ロウ作業

夜中に脱ロウすることで
さらに**効率UP!!**

レジン床重合

一度にフル8床分コース

DS フラスコⅢ L
2床用フラスコ
(DSカルマSは1台あたり
フラスコを2ヶセット
できます！)

DS カルマ S
熱処理器
(最速コース)

DS セリオ S
レジン注入 & 重合器

DS レスタ S
餅状レジン製作者

(熱処理工程中に
レジン餅状製作)

DS システムの中でも
Sクラスだけは
急冷OK!

1クールで
フル8床分完成!

熱処理工程
15～35分

レジン
注入 & 重合
5分

室温で放冷
5～10分

水中で冷却

義歯の掘り出し


×3クール

II

DSカルマSにセットしてから
最短で**90分**後には、
フルで24床分できます!!

※水中冷却時間を20分でした場合


フルで24床分完成!!

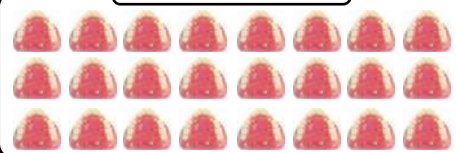

世界で唯一のピュアなレジン


精製された 確かな素材 DSレジン※1

不純物やアレルギー物質を極限まで除去した
世界で唯一の
ピュアなレジンです。

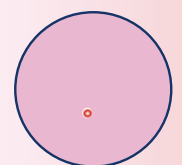

独自の精製方法で
極限まで精製した
DSレジン粉末

DSレジン粉末

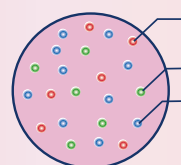

重合促進剤
残留モノマー
不必要な水

従来の床用レジン粉末

レジン粉末1粒のイメージ図

従来品には、パウダーの中に
多種の不純物が入ったまま販売
されています。
DSレジンはこちらの不純物を
精製している世界で唯一の
レジンです！

グレード別DSレジンパウダー

スーパーグレード

- ・紫外線による脱色対策をほどこしている。
- ・不純物を除去する処理はハイグレードと同じ。

ハイグレード

- ・不純物を除去する処理をレギュラータイプの倍ついでやすことで、より発色性を良くした。

レギュラー

- ・ベーシックなDSレジン

スーパーグレード

【スイートタイプ】



No. 3S (繊維なし)
ピーチピンク



No. 5S (繊維入り)
チェリーピンク

【シアータイプ】



No. AB
アクアブルー



No. FP
フェアリーピンク

【トゥースタイプ】



歯冠色
No. A1
No. A2
No. A3



ナイトガード

ハイグレードタイプ



No. 5H (繊維入り)
コーラルピンク

レギュラータイプ



No. 1
クリア



No. 3 (繊維なし)
ピンク



No. 7 (繊維入り)
リアルピンク



No. 8 (繊維入り)
ディープピンク



DSレジン液 (350cc)

※1：DSシステム専用の商品です。
※実際の色は、表示見本と多少異なることがあります。

お口にピッタリ合うデンチャー

STEP 1

DSシステムで模型にピッタリ！
次に目指したのは、お口にピッタリ合うための模型石膏！

変形した模型にピッタリ合っても、口腔内にはピッタリ合いません！


STEP 2

模型が変形することをご存知ですか？


ラボサイドでの脱口ウやレジン床重合時の熱により模型が変形します！

ラボサイドでの熱処理により
変形して生じたスキマ

スキマ見えますか？
目視で確認できません！

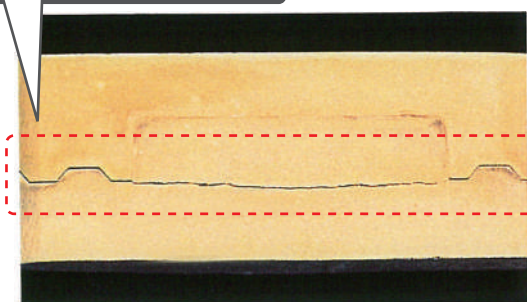

8-3 熱による変形を起こした石膏。多くの石膏が、ほとんど同様の状態になった。通常の石膏は、熱をかけることが前提として製作されていないように思われる。

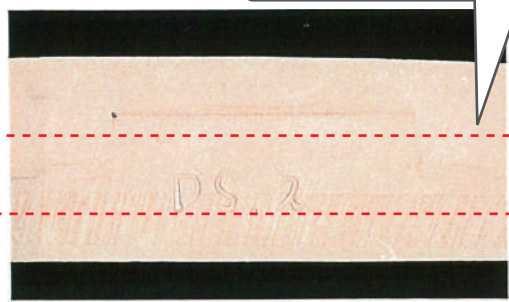

8-4 DSラシオストーンは全く変形していない。熱によるストレスに非常に強い石膏である

※1: 武田英司, 中込敏夫, 寺川國秀「臨床的重合精度の向上を追求した、模型材の選択とレジン床の重合」
医歯薬出版, 歯科技工Vol. 26 No. 9, P1082~P1084より

STEP 3

患者様のニーズに合わせてフィット感で選べます！

【STEP 1 : DSシステムで模型にピッタリ】→【STEP 2 : 変形の極めて少ないODICの石膏を使用】
→【STEP 3 : お口にもピッタリで、新たに装着時のフィット感も選べる！】

義歯セット時における口腔内のフィット感を石膏の膨張率の違いで選んでいただけるように2種類ご用意いたしました。これからは、レジン床重合時の変形を補正するために模型を膨張させるのではなく、義歯のフィット感を患者様にお選びいただくために模型の膨張を活用していただけます。

“ピッタリフィット” 膨張率 0.07%
低膨張タイプ
【ピッタリストーン】

オススメ

大切な印象の再現性をレベルアップ
大多数の義歯模型製作用
ピッタリを求める多くの患者様用



“ソフトフィット” 膨張率 0.32%
高膨張タイプ
【ユッタリストーン】

オススメ

・ピッタリ合すぎると痛みが生じる恐れがあるドライマウス
の患者様用
・金属床義歯の模型製作用



“ぴったりフィット”の低膨張タイプ

ピッタリストーン

大切な印象の再現性をレベルアップ！

ピッタリフィットを求める義歯製作時の模型用硬石膏

膨張率

0.07%



ピッタリストーン（歯科用硬質石膏）

- 届出番号：27B3X00046000005号
- 色調：ブライトイエロー

特長

- ラボサイドでの義歯製作時における流蠟や重合時の熱ストレスによる模型の変形を極限まで防止します。
- 大切な印象の再現性をレベルアップ。凝結膨張率0.07%なので、クラウンブリッジ、矯正などの各種模型製作や咬合器付着など義歯以外にもご使用いただけるオールラウンドな模型材です。
- チッピングが発生しにくく、研削が容易です。
- 粉末が微細なため、滑らかで緻密な模型面に仕上がります。適合性の良い滑沢な義歯床粘膜面が得られます。また、練和が容易で操作性にも優れております。

用途

- 義歯・クラウンブリッジ・矯正などの各種模型の製作。咬合器への付着用。

項目		測定値
混水比		0.24W/P
凝結時間※		7min
凝結膨張※		0.07%
圧縮強さ	1時間後※	42.0MPa
	乾燥後	83.0MPa

※試験方法：JIST6605

“ゆったりフィット”の高膨張タイプ

ユッタリストーン

「ピッタリ合いすぎると痛みが生じやすいドライマウス」や
「金属床の不適合を補正したい」義歯製作時の模型用硬石膏

ユッタリストーン（歯科用硬質石膏）

- 届出番号：27B3X00046000006号
- 色調：レッドブラウン

特長

- ラボサイドでの義歯製作時における流蠟や重合時の熱ストレスによる模型の変形を極限まで防止します。
- 硬化発熱を極限まで抑制しておりますので、大切な印象材の変形を極限まで防止します。
- チッピングが発生しにくく、研削が容易です。
- 粉末が微細なため、滑らかで緻密な模型面に仕上がります。適合性の良い滑沢な義歯床粘膜面が得られます。

用途

- 総義歯・局部義歯の模型製作用

膨張率

0.32%



項目		測定値
混水比		0.24W/P
凝結時間※		10min
凝結膨張※		0.32%
圧縮強さ	1時間後※	37.7MPa
	乾燥後	104.9MPa

※試験方法：JIST6605



DSCALMA S

仕様

電源	単相交流 100V 50/60Hz共用
定格消費電力	640W
外形寸法	幅283mm×奥行321mm×高さ528mm
本体質量	約20.5kg
ヒータ出力	上槽部(UPヒータ): 400W 下槽部(LWヒータ): 200W
液晶用電池寿命	約2万時間
温度ヒューズ	上槽部: 16.9℃、下槽部: 9.6℃
その他内蔵装置	異常過熱防止装置・ヒータ断線検知装置・ センサ断線検知装置

医療機器届出番号: 27B3X00046000025



DSCERIO S

仕様

電源	単相交流 100V 50/60Hz共用
定格消費電力	10W
外形寸法	幅268mm×奥行310mm×高さ517mm
本体質量	約29.0kg
最高使用圧力	0.8MPa
最低必要圧力	0.4MPa(増圧器使用の場合)
使用周囲温度	-5~6.0℃(凍結なきこと)

医療機器届出番号: 27B3X00046000026



DSCRESTA S

仕様

電源	単相交流 100V 50/60Hz共用
定格消費電力	50W
外形寸法	幅310mm×奥行411mm×高さ322mm
本体質量	約11.7kg
使用周囲温度	-5~4.0℃(凍結なきこと)

DSスタータキットS

DSスタータキットSのみの販売は行っておりません。
予めご了承ください。

No.	商品名	入り数
1	DSフラスコIL	2セット
2	DSワックススプレー (50本入)	1箱
3	ホールディーストーン (1kg)	1袋
4	DSガードストーンL (10kg)	1箱
5	DSレジンセバ (500g)	1箱
6	DSフラスコパンチ	1ヶ
7	DSレジン粉 No. 1 (70g サンプル) クリア	1本
8	DSレジン粉 No. 3 (70g サンプル) ピンク	1本
9	DSレジン粉 No. 7 (70g サンプル) リアルピンク	1本
10	DSレジン粉 No. 8 (70g サンプル) ディープピンク	1本

No.	商品名	入り数
11	DSレジン粉 No. 5H (70g サンプル) コーラルピンク	1本
12	DSレジン粉 No. 3S (70g サンプル) ビーチピンク	1本
13	DSレジン粉 No. 5S (360g) チェリーピンク	1箱
14	DSレジン液 (350cc)	1箱
15	注入蓋押え用シリコン型	2ヶ
16	ビットリストーン (1kg)	1箱
17	6.5mm スプレー用シリコン型	1ヶ
18	DS-S専用 ODICデンチャーラベル	50枚
19	デンチャーバックS	50枚
20	デンチャーバックM	50枚
21	デンチャーバックL	20枚
22	センサー穴開け用バー	2ヶ
23	六角レンチ (防錆仕様)	1ヶ
24	フラスコビット	1ヶ

No.	商品名	入り数
25	ストーンセバ (500cc スプレー入)	1ヶ
26	レジン混和袋スタンド	1ヶ
27	ODIC脱口用筆	1ヶ
28	脱口用ゴム手袋	1双
29	*充電器 (電気ドライバー用)	1ヶ
30	*電気ドライバー (ドライバービット付)	1ヶ
31	*軍手	1双

・*の商品につきましては単品販売いたしませんので
予めご了承ください。
・ストーンセバは補充用として『ストーンセバ原液
(700cc 入)』を単品販売しておりますので、3倍
希釈してご使用ください。

- 圧縮空気が常に0.75MPa以上供給できない場合は、別途「増圧器」が必要となります。
- 製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログのお問合せは、右下に記載の販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- このカタログに掲載の製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、5年です。
- 本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
- Products in this catalog are designed for use Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

日米製法特許取得

DSシステムは、レジンの重合に方向性を与えることで、適合精度を
極限まで高めることに成功した画期的なシステムです。
その独自性と優秀さを認められ、日米両国において、他に類のない
優れたシステムとして製法特許を取得しています。

日 本: 特許第1927619号
アメリカ: U.S.P.No.5294380



安全上のご注意

●ご使用前に、必ず製品添付の取扱
説明書、ならびにガイドブックをお
読みの上、正しくお使いください。

ODIC

オーディック株式会社

〒553-0003 大阪市福島区福島7-14-20

<http://www.odic-go.com/>

☎06-6451-7385

※土日祝を除く 9:00~17:00(受付16:30終了)



お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。