

歯07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用ユーティリティーワックス JMDN70896000

## DSワックススプルー

### 【形状、構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

- 1) 形状：棒状(Φ5.0×200mm)
- 2) 成分：パラフィンワックス・蜜蝋・マイクロクリ  
スタリンワックス・着色剤・その他
- 3) 色調：ブライトレッド色

### 【使用目的、効能又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックスをいう。

### 【操作方法又は使用方法】

- 1) 一端を一次埋没した蠟義歯にワックス用インストルメントで焼き付ける。
- 2) もう一端を餅状レジンが流れやすい形状に整えながら、フラスコのレジン注入口につなぐ。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ・本材は可燃性であるので、使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
  - ・本材を高温となる場所(暖房装置の側、直射日光の当たる場所等)に放置しないこと。
  - ・本材は火気厳禁場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
  - ・本材の使用により、発疹や皮膚炎など過敏症状が表れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ・本材は室温で保管すること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

50本/化粧箱入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

\* 製造販売元：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385

受付時間：9:00~17:00(土・日・祝を除く)