

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000  
**サンドビーズAB**

**【形状、構造及び原理等】**

本品は、下記成分により構成される。

- 1) 形状：細粒状
- 2) 成分：アルミナ
- 3) 色調：茶褐色

**【使用目的、効能又は効果】**

アルミナを用いたサンドブラスター用の技工用研削材。

**【操作方法又は使用方法等】**

- \*\*1) キャップを開き、サンドブラスターの研削材補充部に、本材をこぼさないように注意しながら補充する。
- 2) 通法の歯科技工操作に従い、サンドブラスターによる研削作業を行なう。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
  - ・本材の補充、または使用時には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ・本材の補充、または使用時には、目の損傷を防ぐために保護用眼鏡等の防具を着用すること。
  - ・本材は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。
  - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- \*\* 本材は、湿気により固まる事があるので、補充後は袋内の空気をできるだけ抜き、しっかりキャップを閉めて保管すること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、こすらずに大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

- 貯蔵・保管方法
- ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
  - ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

**【包装】**

- \*\*・ペンシルノズル用：AB-S
- \*\* 3kg入アルミ袋  
20kg入ポリ袋内装箱入
- \*\*・固定式ノズル用：AB-M
- \*\* 3kg入アルミ袋  
20kg入ポリ袋内装箱入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

- \* 製造販売元：オーディック株式会社  
住 所：〒553-0003  
大阪府大阪市福島区福島7-14-20  
大阪みつほビル内  
電 話 番 号：06-6451-7385  
受 付 時 間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)